

DIAGRAMA



USO

- 1 Introducir en la clavija la cánula de silicona que mejor se adapte a su oído. (Fig. 1)
- 2 Encender en posición ON (Fig.2)
- 3 Introducirlo en el oído y ajustar el volumen (Fig.3)

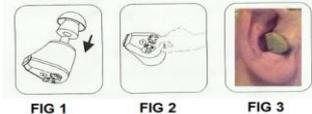


FIG 1

FIG 2

FIG 3

INDICACIONES


Comience a probar con el volumen más bajo y súbalo gradualmente hasta que el sonido sea el adecuado a sus necesidades.

Si acerca la mano puede generar pitidos de interferencia.

Si no necesita usarlo apáguelo, poner en posición OFF y la batería le durará más tiempo.

La carga batería suele durar aproximadamente 8-10 horas

CARGADOR

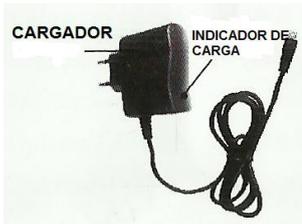

Para la carga solo use el cargador incluido, no utilice un cargador distinto ya que puede dañar el aparato

RECARGA

- 1 Poner el interruptor en Off
- 2 Conectar el cable en el puerto USB del aparato (Fig. 1)
- 3 Conectar el cargador a la red (Fig.2)

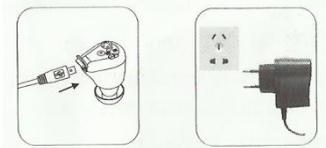


Figura 1

Figura 2

4 Durante la carga la luz indicadora estará ROJA, cuando ésta tenga una carga mínima se pondrá VERDE, aún así continuar cargando, para una carga completa dejar mínimo 4 horas.

5 La primera carga es de aproximadamente 8 horas, las sucesivas son de 4 horas

IMPORTANTE

No usar en el agua (ducha, etc.)

Conservar en lugar seco y a temperatura entre 10 y 40°

Se recomienda utilizar durante cortos periodos de tiempo, usar solo cuando necesite amplificar sonidos

No compensa pérdidas auditivas



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Salida máxima 133 ± 5dB

Ganancia >40 dB

Distorsión armónica <10%

Frecuencia 440-3600 Hz

Ruidos de entrada <30 dB

Batería Ni-MH 1,2 v