

DIAGRAMA



USO

- 1 Introducir en la clavija la cánula de silicona que mejor se adapte a su oído.
- 2 Encender, interruptor hacia arriba en posición (ON)
- 3 Introducir en el oído
- 4 Ajustar volumen

INDICACIONES

Comience a probar con el volumen más bajo y súbalo gradualmente hasta que el sonido sea el adecuado para sus necesidades. Si acerca la mano puede generar pitidos de interferencia. Cuando no lo use, apagarlo, poner interruptor hacia abajo en posición (Off) y la batería le durará más tiempo.

RECARGA

- 1 Poner el interruptor hacia abajo, posición apagado (Off) e insertar en la base.
 - 2 Conectar el cable del cargador en el puerto USB de la base.
 - 3 Conectar el cargador a la red eléctrica.
 - 4 Durante la carga la luz indicadora estará **ROJA**, cuando tenga algo de carga se pondrá **VERDE**, continúe cargando mínimo 3 horas para una carga completa.
- Para la carga solo use el cargador incluido, no utilice un cargador distinto ya que puede dañar el aparato.



IMPORTANTE

No usar en el agua (ducha, etc.)
Mantener en un ambiente seco.
Se recomienda utilizar durante cortos períodos de tiempo, usar solo cuando necesite amplificar sonidos.
No compensa pérdidas auditivas.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Salida máxima 140 ± 5 dB
Ganancia >46 dB
Distorsión armónica $<6\%$
Frecuencia 100-4000 Hz
Ruidos de entrada <28 dB
Batería Ni-MH 1,2 v
Consumo <3 mA